



TEXEL

EQUIPOS ELECTROMEDICOS

MANUAL DEL USUARIO





LIPOTERM

CRIO LIPOLISIS

texel.com.ar
facebook.com/texel.srl

TABLA DE CONTENIDO

1.0 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	2
2.0 - IMPORTANTE PARA EL USUARIO	3
3.0 - SIMBOLOGÍA.....	3
4.0 - PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA	4
Pantalla Nro. 1 – Presentación del Equipo.	4
Pantalla Nro. 2 – Programación	5
Pantalla Nro. 2a – Programación Temperatura.....	6
Pantalla Nro. 2b – Programación Intensidad de Vacío	7
Pantalla Nro. 2c – Programación Tiempo de Sesión.....	8
Pantalla Nro. 3 – Trabajando	9
Pantalla Nro. 4 – Fin de sesión	10
4.0 - MANTENIMIENTO.....	11
5.0 - SERVICIO TÉCNICO.....	12
6.0 – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.....	12
7.0 - CONDICIONES DE GARANTÍA	12

1.0 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas:

- Aparato Clase I.
- Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz.
- Frecuencia 38 Khz.
- Potencia Total 70W.
- Consumo aprox. en reposo: 50 V.A.
- Consumo aprox. trabajando: 300 V.A.
- Controlado por Microprocesador.
- Pantalla LCD Gráfica COLOR de 320 x 240 sensible al tacto, retro iluminada

Salidas:

- 1 cabezal Corporal

Regulación de Temperatura

- -10º a -10º

Intensidad de Vacío:

- 20 a 100 %

Tiempo de Sesión:

- 10 a 60 minutos.

Dimensiones:

- Ancho: 50 cm.
- Alto: 95 cm.
- Profundidad: 34 cm.

2.0 - IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas.

3.0 - SIMBOLOGÍA

				
TIPO I - CLASE B	ATENCIÓN Consulte Documentación	CORRIENTE ALTERNA	CONEXION A TIERRA	FUSIBLE


4.0 - PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA

Una vez encendido el equipo se podrá leer en la pantalla las siguientes leyendas explicadas más abajo.

Pantalla Nro. 1 – Presentación del Equipo.

La primera pantalla es sólo una presentación del equipo.

1 – Presione sobre la “T”
girando.

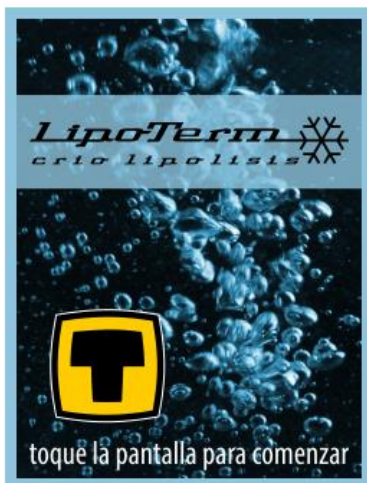

Pantalla Nro. 2 – Programación

En esta pantalla se podrá programar los parámetros del equipo: Temperatura, Intensidad de Vacío y Tiempo de Sesión.



Una vez configurados los parámetros solicitados por el equipo, apretando el botón INICIAR comenzará la sesión. Prepárese y de ser necesario acomode algún accesorio extra que pueda llegar a utilizar.

Si desea cambiar algún parámetro puede hacerlo sin tener que detener o pausar la sesión

Pantalla Nro. 2a – Programación Temperatura.

Seleccione la temperatura deseada que puede ser entre -10° y 10° . Una vez elegida la temperatura presione ATRÁS.

Vuelve a la
pantalla
anterior.



Pantalla Nro. 2b – Programación Intensidad de Vacío

Seleccione la Intensidad de Vacío deseada que puede ser entre 20 % y 100%. Una vez elegida presione ATRÁS.



Vuelve a la
pantalla
anterior.



Pantalla Nro. 2c – Programación Tiempo de Sesión

Seleccione el Tiempo de Sesión deseado que puede ser entre 10 y 60 Minutos. Una vez elegido presione ATRÁS.

Vuelve a la
pantalla
anterior.



Pantalla Nro. 3 – Trabajando

Esta pantalla indica los parámetros configurados. Puede modificar cualquier valor sin detener el equipo.

En cualquier momento puede finalizar la sesión con el botón DETENER



Presione para finalizar la sesión.

Pantalla Nro. 4 – Fin de sesión

Una vez finalizada la sesión el equipo genera una señal audible, y muestra la siguiente pantalla, Para comenzar una nueva sesión, presione INICIO y el equipo lo llevará a la pantalla Número 1 donde podrá seleccionar los nuevos parámetros.



NOTA: El Cabezal dispone de una pantalla más pequeña sensible al tacto. La información es la misma que nos muestra la pantalla principal. Sirve a modo informativo o para facilitar al operador a la hora de tener que modificar algún parámetro si fuese necesario.

4.0 - MANTENIMIENTO

Trampa de Agua: El equipo cuenta con una trampa de agua en la cara posterior. Esta se utiliza para contener cualquier tipo de líquido o producto que pueda llegar a ser succionada a través del cabezal. En caso de ser necesario sacar el recipiente contenedor, limpiar, lavar y volver a colocar.



Traslado: Cada vez que traslade el equipo deberá dejarlo reposar entre 3 y 4 horas antes de volver a utilizarlo.

5.0 - SERVICIO TÉCNICO

El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado expresamente para tal fin.

En caso de requerirlo, contacte a su proveedor o directamente a TEXEL indicando modelo y nº de serie del equipo.

NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO

6.0 – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un trapo húmedo con detergente neutro.

La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 grados centígrados.

Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede efectuar un control periódico en fábrica.

No se puede esterilizar en autoclaves de vapor.

7.0 - CONDICIONES DE GARANTÍA

El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 (dos) años.

La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un distribuidor o representante autorizado.

Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica.

La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas.

La garantía no cubre cables, cortados por mal uso.

La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido a usos o esfuerzos inadecuados, ha sido objeto de reparación no autorizada, o fue conectado a una instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las variaciones de tensión de la red fuera de la tolerancias, así como voltajes erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo.

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor o servicio técnico autorizado.

DESDE
1980

Tel/Fax 54 341 439 7575 y rotat.

Pichincha 54 Bis. (ex Riccheri 52 Bis)
S2002LOB - Rosario - Santa Fe - Argentina

texel.com.ar
facebook.com/texel.srl

